

INSTRUCCIONS I MANTENIMENT MASCARETA HIGIÈNICA UDL



Renta't les mans amb
aigua i sabó o amb
solució hidroalcohòlica
abans de manipular la
mascareta.

Identifica la part superior i posiciona-la
a l'alçada del nas.
Agafa la mascareta des de l'exterior i
passa les bandes per darrera de les
orelles.





Baixa la part inferior de la mascareta a la
barbeta i verifica que està col·locada
correctament.

Un cop ajustada, no la toquis amb les
mans.



No has de deixar que la mascareta pengi
del coll.

Substitueix la mascareta tan aviat com
estigui humida

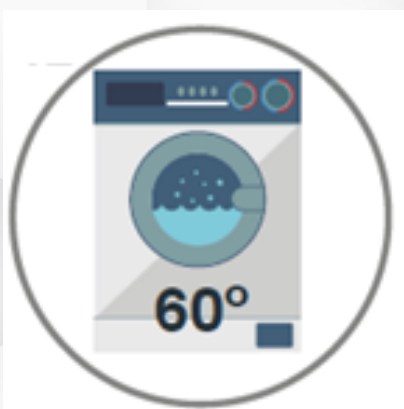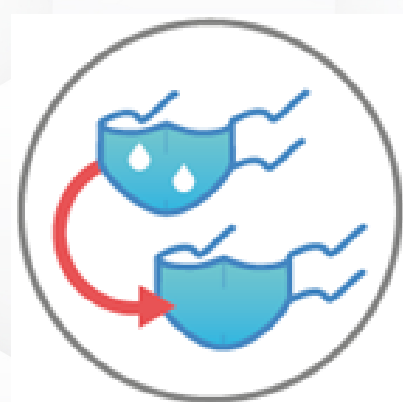

La mascareta reutilitzable UdL pot rentar-
se a més de 60 ° amb un mínim de 20
cicles de rentat i secat.